

Esta es una iniciativa de la Unidad de Arquitectura Avanzada, en conjunto con la comunidad de makers a nivel internacional para colaborar con los servidores de salud frente al COVID-19.



RECOMENDACIONES LIMPIEZA MÁSCARAS

COVID -19



- 1- Son de uso personal.
- 2- El limpie la máscara debe cumplir extrema higiene, no hablar, toser o estornudar frente al visor.
- 3- El visor sirve sólo como primera barrera, se debe colocar la mascarilla debajo.
- 4- Se debe lavar con agua y jabón líquido. Sin frotar, dejar sumergida por 15 minutos, enjuagar con suficiente agua potable.
- 5- Se debe Secar con toallas húmedas de alcohol isopropílico o etílico al 60 % o atomizar con una solución de cualquiera de los dos alcoholes.
- 6- Pasar por una corriente de aire caliente, con temperatura entre 60 a 70 grados centígrados por 5 minutos, no fijo, en movimiento para no deformar el material.

NOTAS:

- No se debe frotar para impedir que el material se ralle.
- El pH del agua de jabón debe ser de 8 a 10, nunca ácido
- Se recomienda limpiar cada vez que se vaya a usar y no usarla más de 5 veces.

**ESTE PRODUCTO ES UNA DONACIÓN.
PROHIBIDA SU VENTA.**

Estas mascararas fueron realizadas bajo el movimiento de producción libre makers, igual que las que han desarrollado en España y el mundo. No tiene certificación, favor esterilizarla antes de usar.